





## Trumpas naudotojo vadovas



## IntegraMouse Plus montavimas

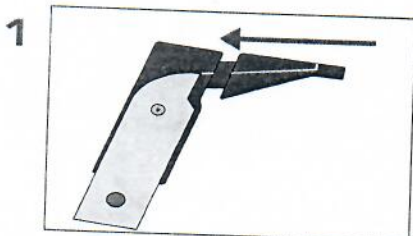


Uždėkite antgalį

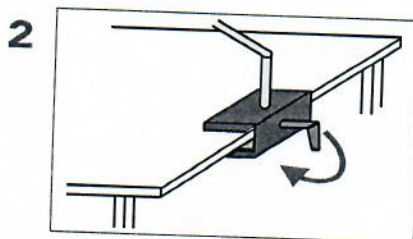


Prisukite stovo laikiklį


3. Nuimkite veržlę.

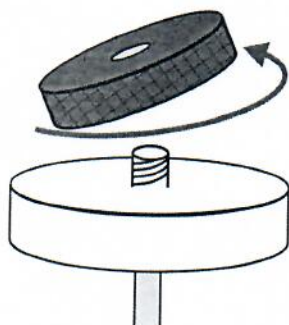

4. Pasirinkite vieną iš 3-ų esamų angų.

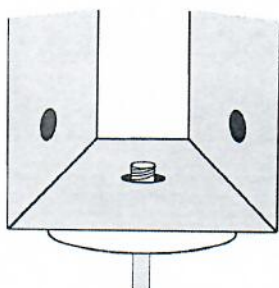

5. Užsukite veržlę.

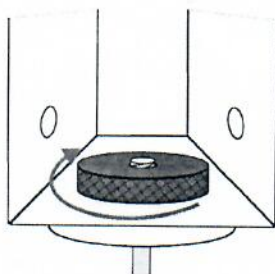

6. Nukreipkite prietaisą į norimą darbinę padėtį.




## IntegraMouse pajungimas prie laido

7. Įjunkite kompiuterį.

8. Pajunkite USB laidą prie IntegraMouse įrenginio.



9. Pajunkite USB laidą prie kompiuterio.

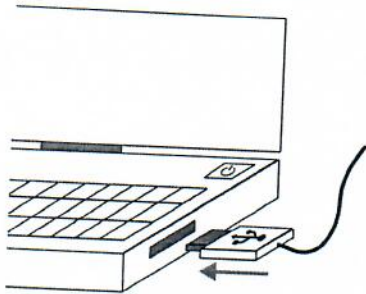

Visi kiti veiksmai vykdomi automatiškai:

- Įkraunama IntegraMouse Plus akumuliatorių
- IntegraMouse Plus automatiškai įsijungia (užsidega žalia LED lemputė)
- IntegraMouse Plus trumpam kalibruojasi (pakaitomis mirkteli žalia ir mėlyna LED lemputės)

**SVARBU:** Nelieskite IntegraMouse Plus kol kalibruojasi!

- Jūsų kompiuteris įsidiegia IntegraMouse Plus taip kaip standartinę kompiuterio pelę

**Jūsų IntegraMouse Plus paruoštas darbui!**

Kitame puslapyje rasite trumpą informaciją kaip pajungti IntegraMouse Plus prie wifi.

Peržvelkite [www.youtube.com](http://www.youtube.com) išsamesnius mokymo vaizdo įrašus.


## Informacija dėl eksploataavimo per belaidį ryšį

### IntegraMouse Plus Connect (IM+ Connect)


Prieš pradėdant naudotis belaidžiu režimu, įsitikinkite, kad IntegraMouse Plus akumuliatorius yra įkrautas.




Pakeiskite bateriją su pridėdamu maitinimo bloku

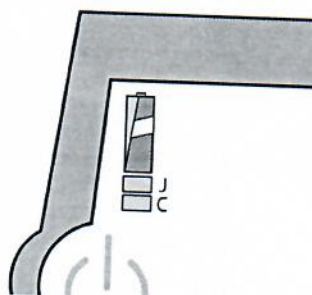


Jei abu LED šviečia žaliai – akumuliatorius yra įkrautas

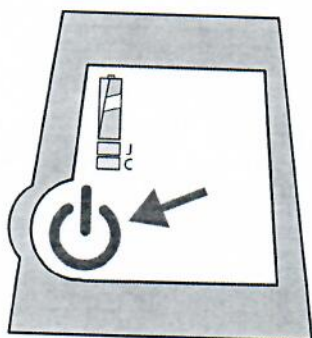


Įjunkite IntegraMouse Plus

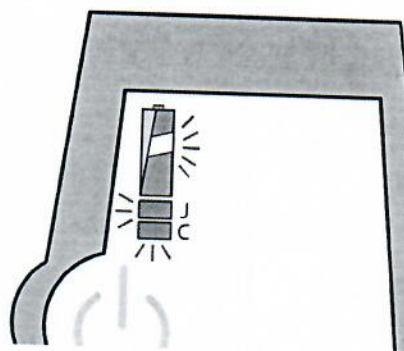

IntegraMouse Plus kalibruojasi – mirksi žalia ir mėlyna lemputės

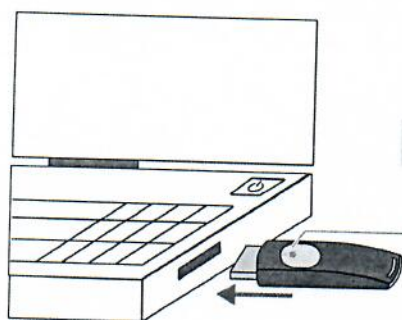

Pajunkite IM+Connect į kompiuterio USB jungtį

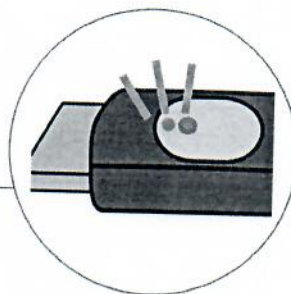

Ryšys užmegztas – įsijungia IM+Connect žalia LED

# Bendros valymo pastabos

## IntegralMouse Plus naudojimas klinikiame sektoriuje

- Kaip vienkartinės priemonės naudokite kandiklį, membraną ir silikoninį vamzdelį
- Kas kiek laiko reikia keisti kandiklį, turėtų nustatyti gydytojas arba specialistas.
- Įtarus užkrečiamąsias ligas, būtina imtis specialių atsargumo priemonių

## Dezinfekavimas šluostant

- Naudokite tik paviršiaus dezinfekavimo priemones, tinkančias LEXAN polikarbonatui ir aliuminiui
- Mes rekomenduojame Schulke & Mayr ([www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)):
  - Mikrozyd Sensitive skystis arba
  - Mikrozyd Sensitive šluostės

## Nenaudokite sterilizacijos garais!

- Burnos kandiklis, bei kiti IntegraMouse Plus komponentai nepritaikyti garų, šlapiam ar spinduliniam sterilizavimui

## Nenaudokite agresyvių valymo priemonių

- Niekada nenaudokite agresyvių valymo priemonių – tai pažeis komponentų paviršių

## Nenardinkite vandenyje

- Niekada nenardinkite IntegraMouse Plus ir elektroninių detalių, priedų į vandenį. Nenaudokite tekančio vandens – galite pažeisti prietaisą

## Teisingas prietaisų valymas

- Visos IntegraMouse Plus dalys, burnos kandiklis, IM+Connect, maitinimo blokas, įskaitant kabelį ir stovą, gali būti valomi tik nušluostant drėgnu audiniu be pūkelių
- Dalis išvalykite vieną kartą į savaitę

Išsamesnę informaciją galite rasti originaliose instrukcijose.

## Trumpa instrukcija, kaip išvalyti burnos kandiklį bei pakeisti membraną

### Kandiklio valymo ir keitimo intervalai:

- Valymas:      mažiausiai kartą per savaitę  
                    dažniau, jei sergama
- Keitimas:      jei pažeista ar atsiranda nudėvėjimo žymių  
                    maždaug kas šešis mėnesius

### Membranos naudojimo intervalai:

Visada išmeskite membraną, valyti nerekomenduojama


1. Tiesiu judesiu ištraukite kandiklį



2. Nuimkite ir išmeskite membraną



3. Užkaitinkite vandenį iki virimo

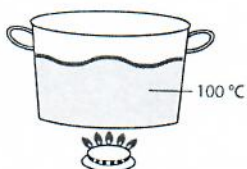

















4. Šaukštu panardinkite burnos kandiklį į vandenį



5. Įsitinkinkite, kad burnos kandiklis pilnai panardintas vandenyje
6. Palikite burnos kandiklį vandenyje bent 5 minutėms
7. Šaukštu ištraukite burnos kandiklį iš karšto vandens
8. Palikite burnos kandiklį atvėsti ir išdžiūti
9. Uždėkite naują membraną ant kandiklio
10. Uždėkite kandiklį ant prietaiso tiesiu judesiu
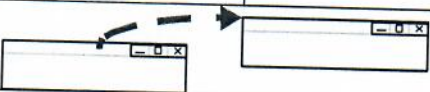
## IntegraMouse Plus funkcionalumas

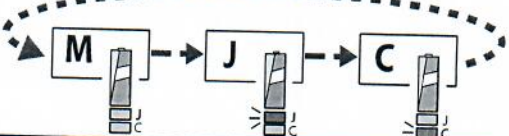IntegraMouse Plus turi tris darbo režimus, standartinis - pelės režimas.

	M - pelė	J- vairasvirtė ("džoistikas")	C - kursorius
Judinkite burnos kandiklį : Aukštyn Žemyn Kairėn Dešinėn			
Traukti orą į save	Kairys Paspaudimas 	Taste 1 	Leertaste 
Pūsti	Dešinys Paspaudimas 	Taste 2 	Eingabe-Taste 
DVIGUBAS PASPAUDIMAS – 2 kartus trumpai traukti orą į save	2 x 		
PAIMTI IR NUNEŠTI (DRAG & DROP) Įtraukti orą ir laikyti burnoje			
KALIBRAVIMAS Naudotojas: pūsti 3 sek – įtraukti 3 s. Padėjėjas: paspausti ON/OFF	LEDs leuchten abwechselnd 		
ESC 3 sek pūsti – 2 kart traukti – 1k pūsti			
REŽIMO KEITIMAS 2k pūsti – 2k traukti – 1k pūsti			
Po 30 sek kai prietaisas nenaudojamas įsijungia energijos taupymo režimas (LED užgessta)			
Išjungti: tik baterijos režime ir pelė turi būti aktyvi (LED įsijungia)	AUSSCHALTEN On/Off-Taste 3 sec. drücken 		

Išsamesnę informaciją galite rasti naudojimo instrukcijoje.